



MANUAL DEL RESPALDO TELA PARA ROLLATORS

ÍNDICE

- 1 Importante
- 2 Simbología de la etiqueta y del manual
- 3 Indicaciones del producto
- 4 Descripción del producto
- 5 Montaje y uso
- 6 Datos del fabricante

1.- IMPORTANTE

Lea el manual cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo en caso de necesidad.

Si no puede leer o comprender alguna advertencia, precaución o instrucción, póngase en contacto con el vendedor antes de utilizar este producto o se pueden producir riesgos y daños.

Consulte a su médico u ortopeda antes de usar el producto.

2.- SIMBOLOGÍA DE LA ETIQUETA Y DEL MANUAL

	Datos del fabricante		Fecha de fabricación
	Dispositivo Médico (Medical Device)		Observe las instrucciones de seguridad
	Peso máximo de usuario en kg		Conformidad CE
	Precaución, peligro de atrapamiento		Invitación a consultar el manual de usuario
	Información de reciclaje del producto		Punto limpio
SN	Número de serie del producto	LOT	Número de lote del producto
REF	Referencia o código del producto		

3.- INDICACIONES DEL PRODUCTO

El respaldo de tela para rollators es un accesorio para andadores de la marca Forta, no se podrá colocar en otros modelos que los especificados más abajo ni en los de otras casas. Este accesorio consiste en una tela acolchada y reforzada cosida a unas piezas plásticas que se adhieren a ciertos andadores Forta. El respaldo debe colocarse de forma adecuada para asegurar su correcto funcionamiento. Este respaldo puede colocarse en los siguientes andadores:

- Drakon 1
- Drakon 2
- Kanguro
- Kanguro HD
- Kanguro F1
- Kanguro F2
- Kanguro Plus
- Komodo 1
- Komodo 2
- ARA-Plus
- ARA-D

4.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO






1. Tela respaldo acolchada y reforzada

2. Anclaje respaldo

5.- MONTAJE Y USO


Para montar el respaldo de tela en uno de los andadores de los modelos compatibles, arriba mencionados, sigue los siguientes pasos:

1. Coloca el anclaje al lado de una de las piezas correspondiente del andador. La pieza se encuentra directamente debajo del clip de regulación de los puños y cuenta con un agujero en cada uno de sus lados.
2. Mientras sujetas el andador agarrándolo del puño con una mano, con la otra presiona el anclaje por uno de los lados y busca encajar el tetón (el saliente) con el agujero de la pieza del andador. Puedes mover el anclaje hasta que notes que ese lado ha encajado y el tetón haya entrado en el agujero.
3. Una vez encajado uno de los lados del anclaje, presiona sobre su lado contrario para encajarlo. Asegúrate de que ambos tetones quedan dentro del agujero y que el anclaje rodea perfectamente al andador.
4. Asegúrate de que el anclaje está fijado tirando fuertemente de él hacia afuera. Si el anclaje no se suelta, procede con los pasos anteriores con el anclaje del lado contrario.
5. Una vez fijados ambos anclajes, tira del respaldo sujetando el andador para comprobar que no se suelta, asegurándote de que esté bien anclado.

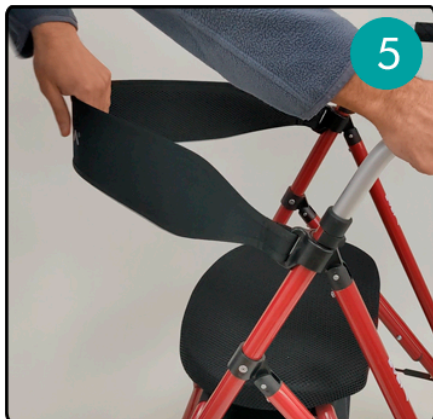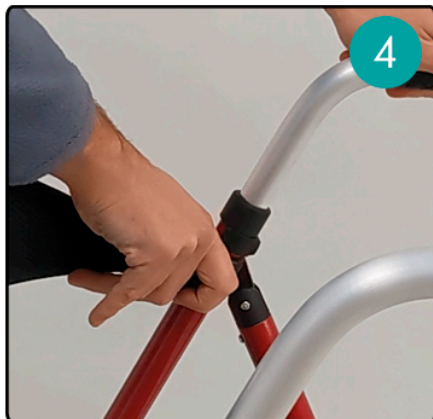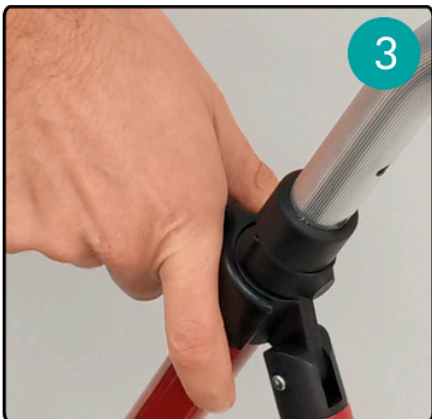



Si los anclajes no se fijan correctamente el respaldo podrá soltarse y el usuario podrá caerse al apoyarse. Debe asegurarse de que los dos tetones de cada anclaje están bien introducidos dentro del andador. Antes de sentarse en el andador y utilizar el respaldo debe asegurarse de que ambos anclajes están bien fijados. Tire fuertemente de cada uno de ellos y de la tela del respaldo hacia afuera para asegurarte.

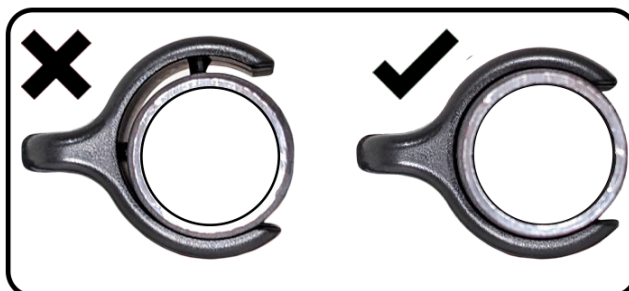

En caso de necesitar desmontar el respaldo, es aconsejable utilizar un destornillador plano. Introduce la punta del destornillador por uno de los lados del anclaje y gíralo para soltar ese lado. Una vez suelto un lado, simplemente tira del anclaje para sacarlo completamente.

6.- DATOS DEL FABRICANTE

FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.

Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1

02007 Albacete

España - Spain

Apartado de Correos 5316

info@fortasl.es

www.fortasl.es



MADE IN EUROPE

